

so funktioniert die Typisierung

1. QR Code im Karton scannen und deine Daten eingeben



2. am Ende der Registrierung QR Code mit deiner Spendernummer scannen




3. Mund spülen und die Verpackung bis zur Hälfte aufreißen



4. Reibe jeden Tupfer 30 Sekunden unter Drehen über die rechte und linke Wangeninnenseite

5. Stäbchen in die geöffnete Verpackung zurückstecken. Nicht zukleben!

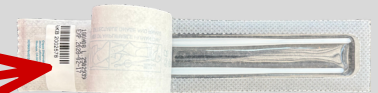

6. Set in das Rücksendekуверт stecken und im Karton an uns zurücksenden



Voraussetzungen für die Registrierung als Stammzellspender:

→ gesund

→ zwischen 17- 45 Jahre alt

→ bisher in keiner Datenbank registriert